
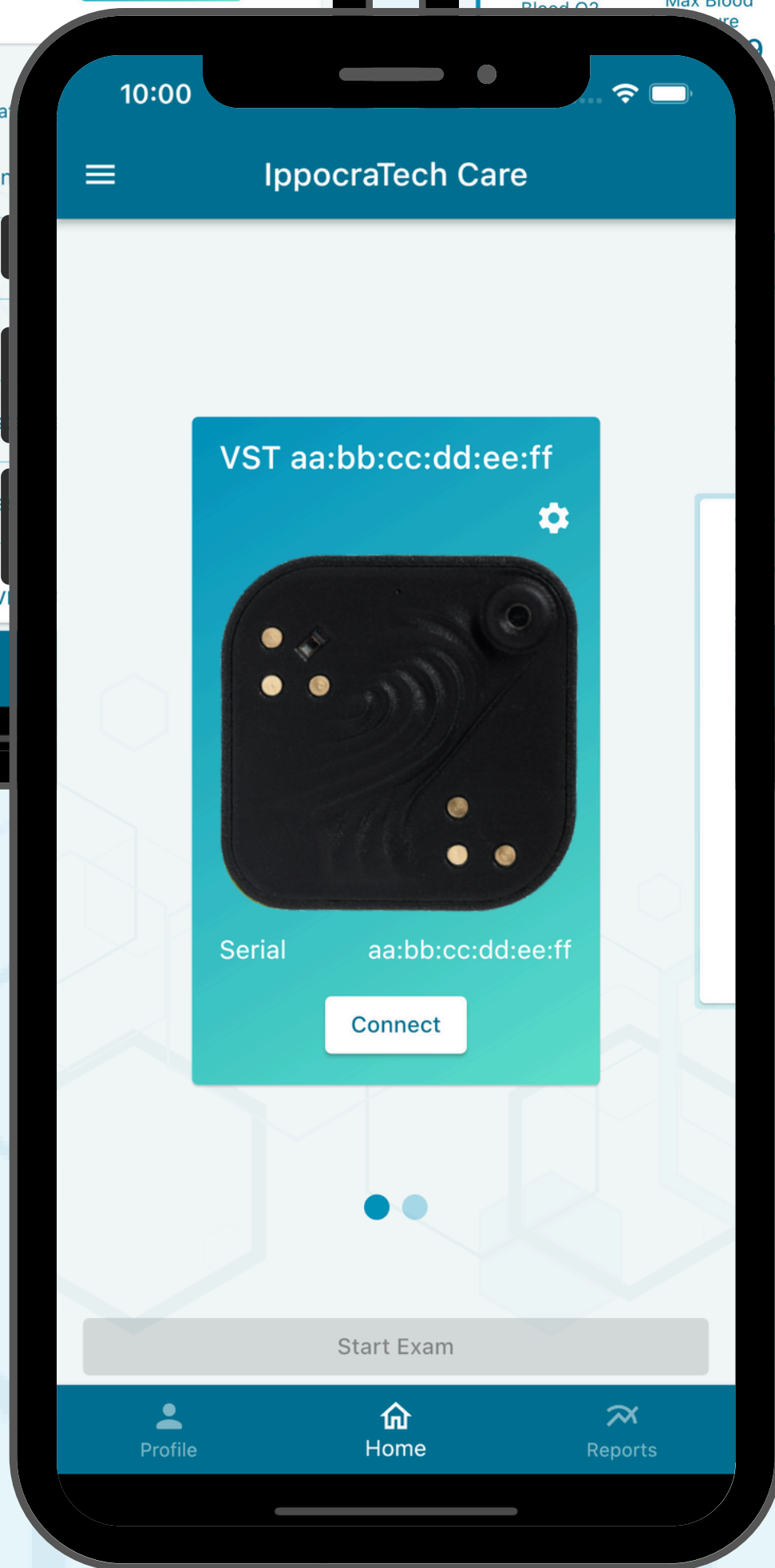



# IppocraTech®

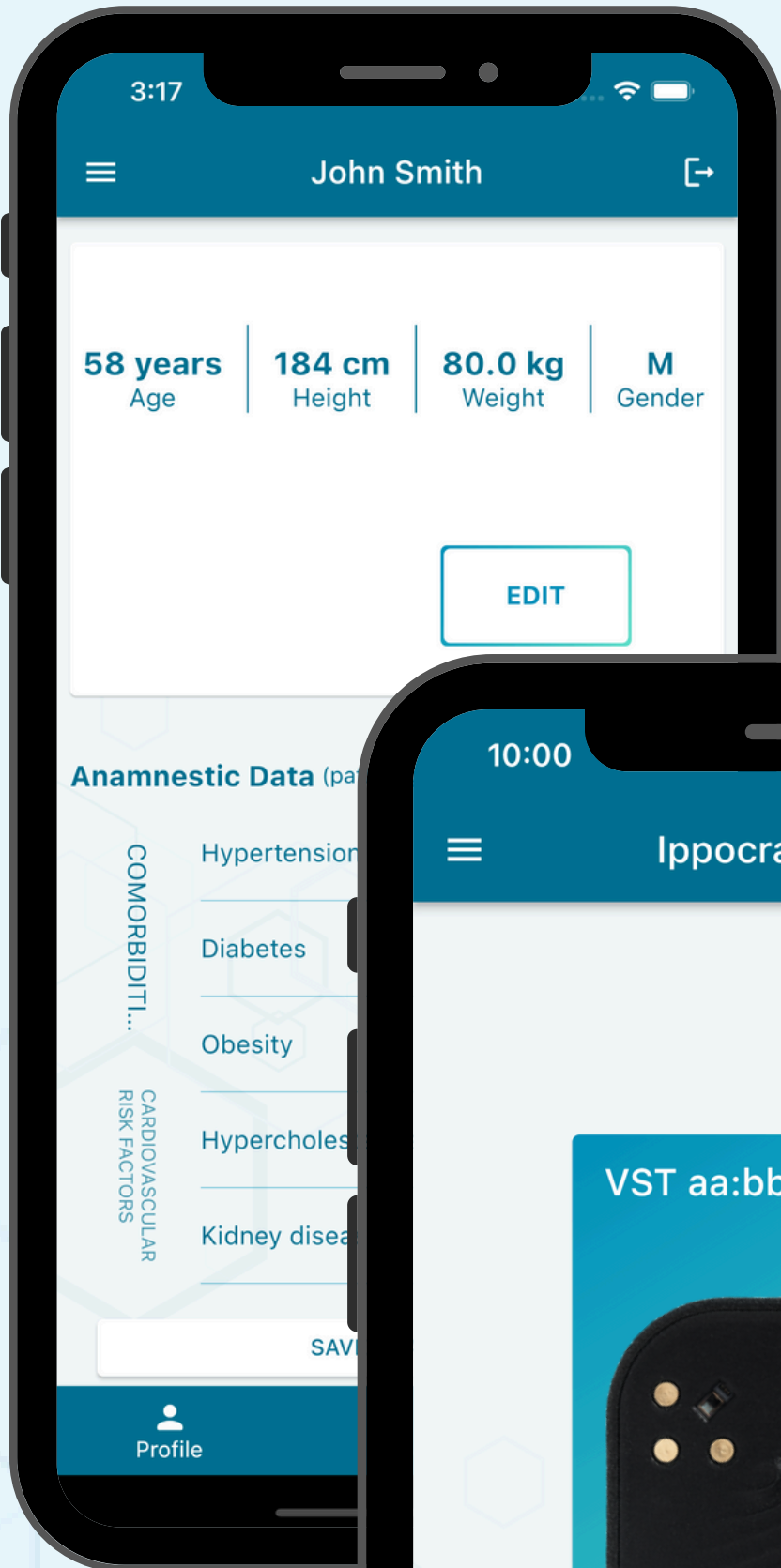

# PRESENTAZIONE

## DISPOSITIVO

COMPONENTI E MODALITÀ DI ACCENSIONE

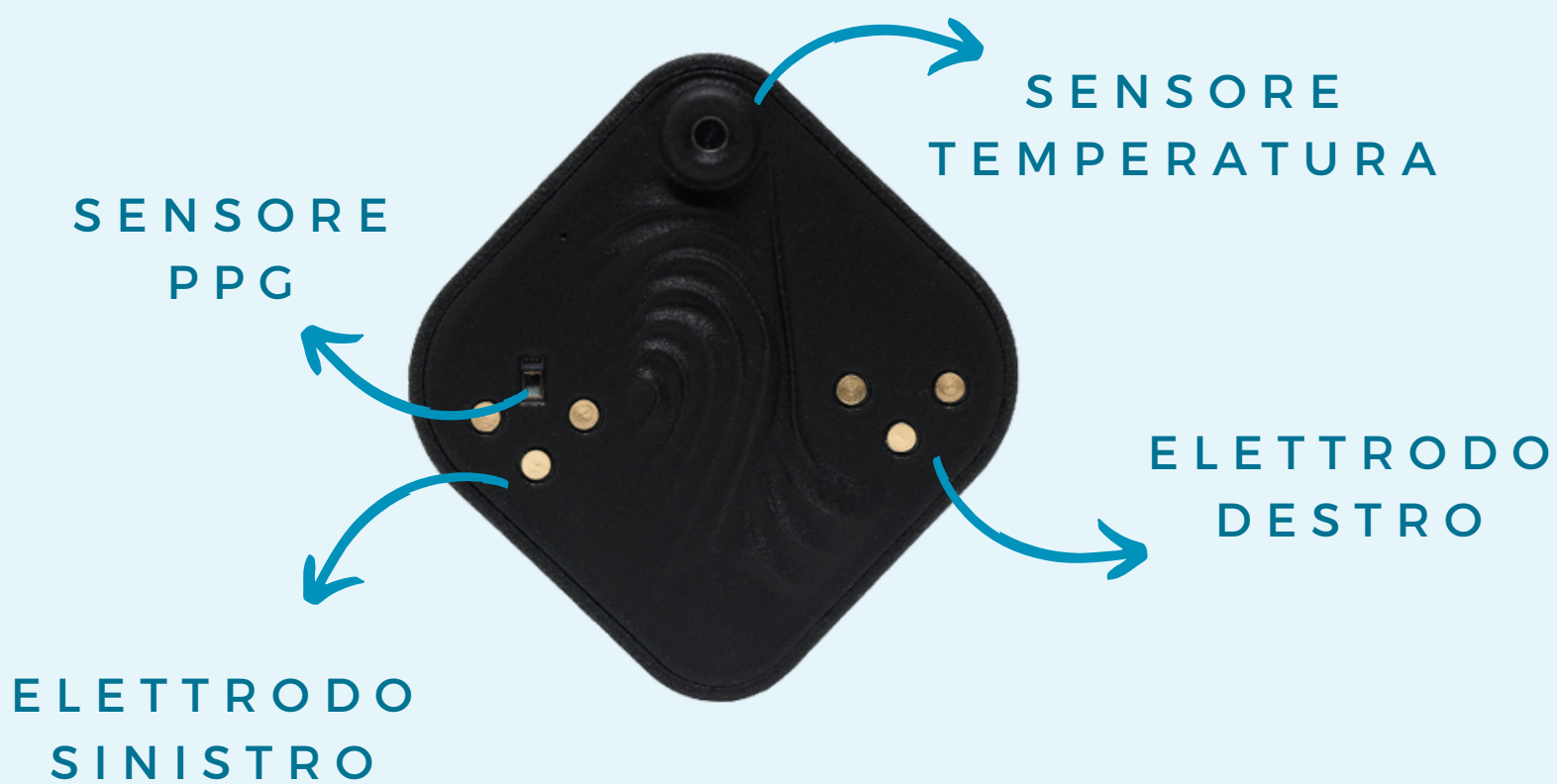

SCUOTI IL DISPOSITIVO PER ACCENDERLO





RIMARRÀ ACCESO PER QUALCHE SECONDO

# AGGIUNGI

UN NUOVO DISPOSITIVO PER  
INIZIARE

(RICORDA DI ATTIVARE IL BLUETOOTH E LA POSIZIONE)

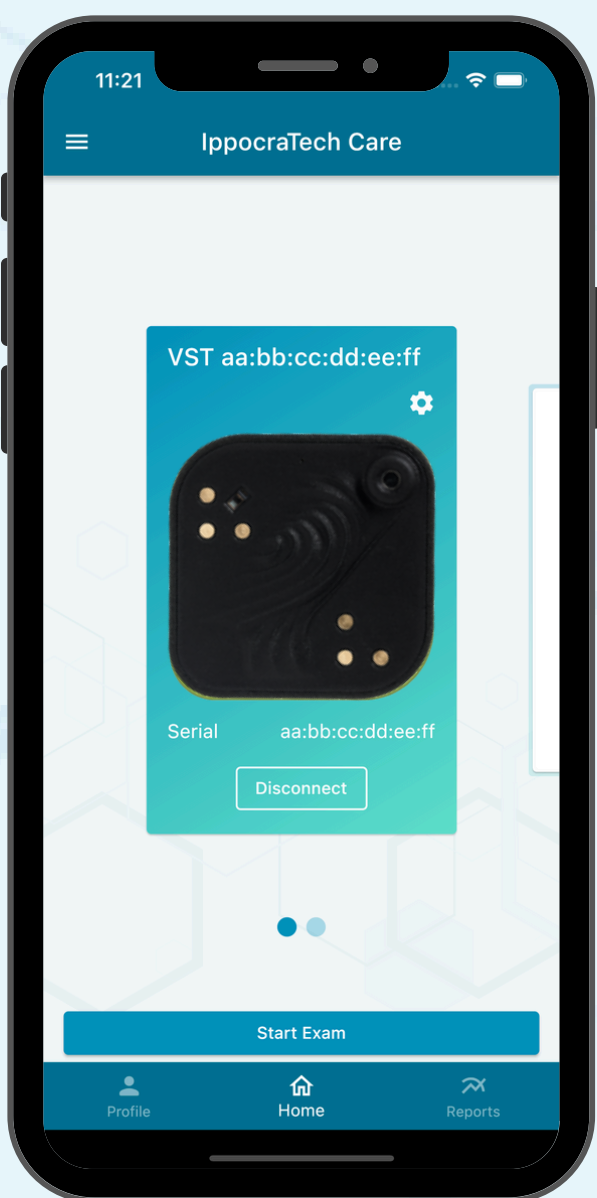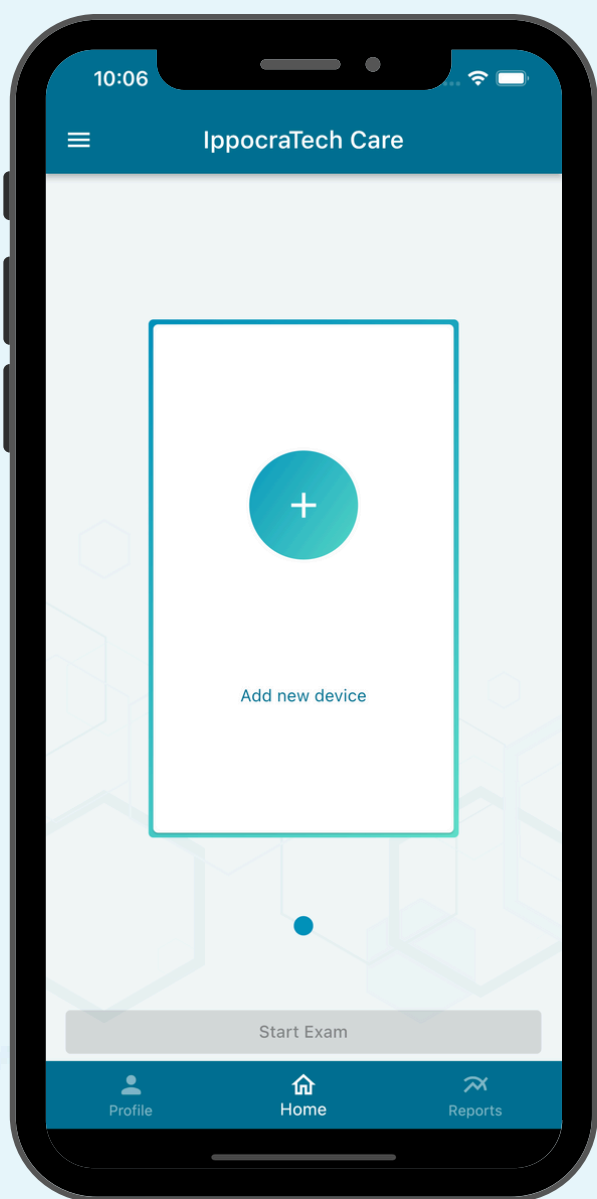


# INIZIA L'ESAME

ORA SEI PRONTO/A PER  
INIZIARE IL TUO ESAME

## PRIMO PASSO

AVVICINA IPPOCRATECH CARE  
ALLA FRONTE PER MISURARE  
LA TEMPERATURA

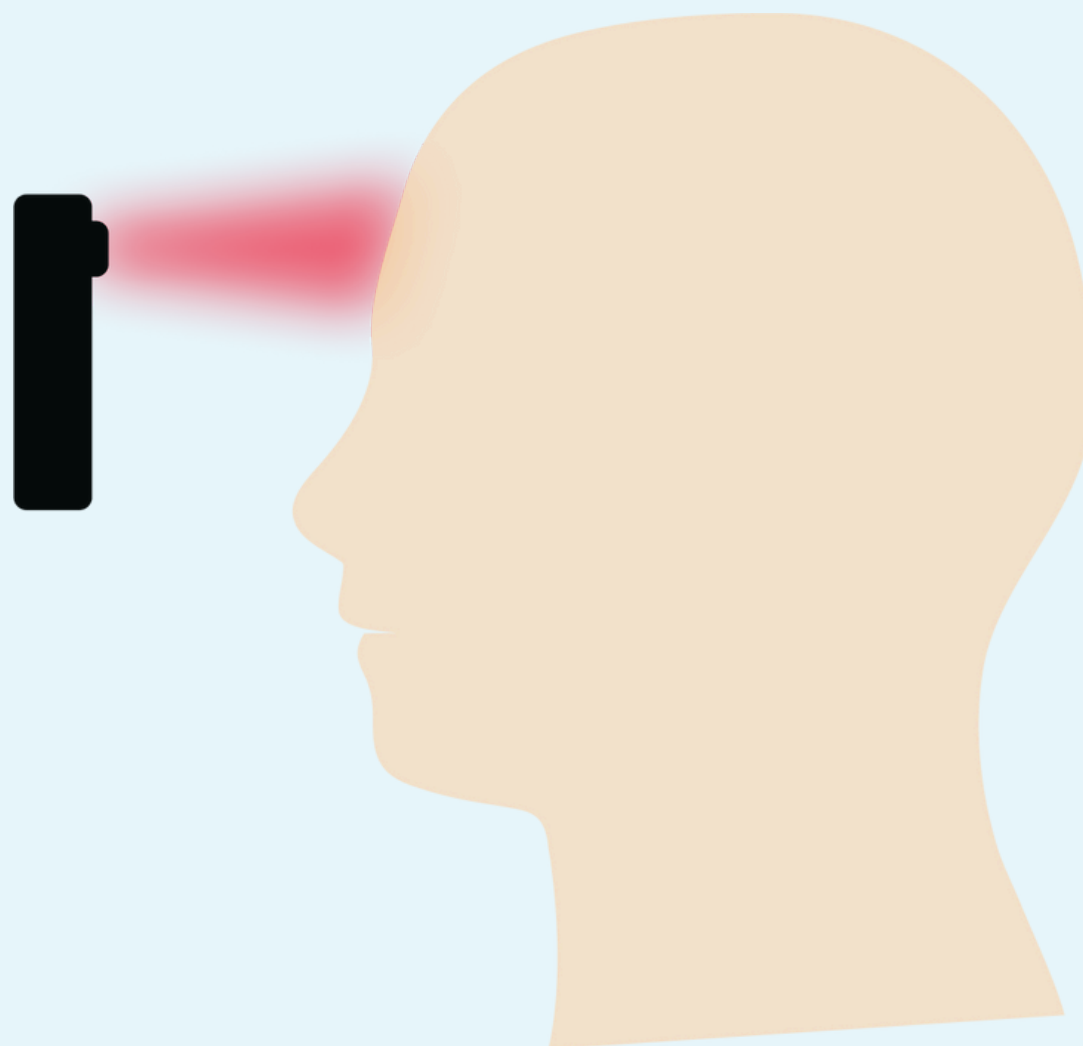

## SECONDO PASSO


POSIZIONA I POLLICI  
SULL'IPPOCRATECH CARE  
SENZA APPLICARE FORZA





# ESEGUI IL TUO ESAME

SOLI 90 SECONDI PER  
CALCORAE I TUOI PARAMETRI  
VITALI

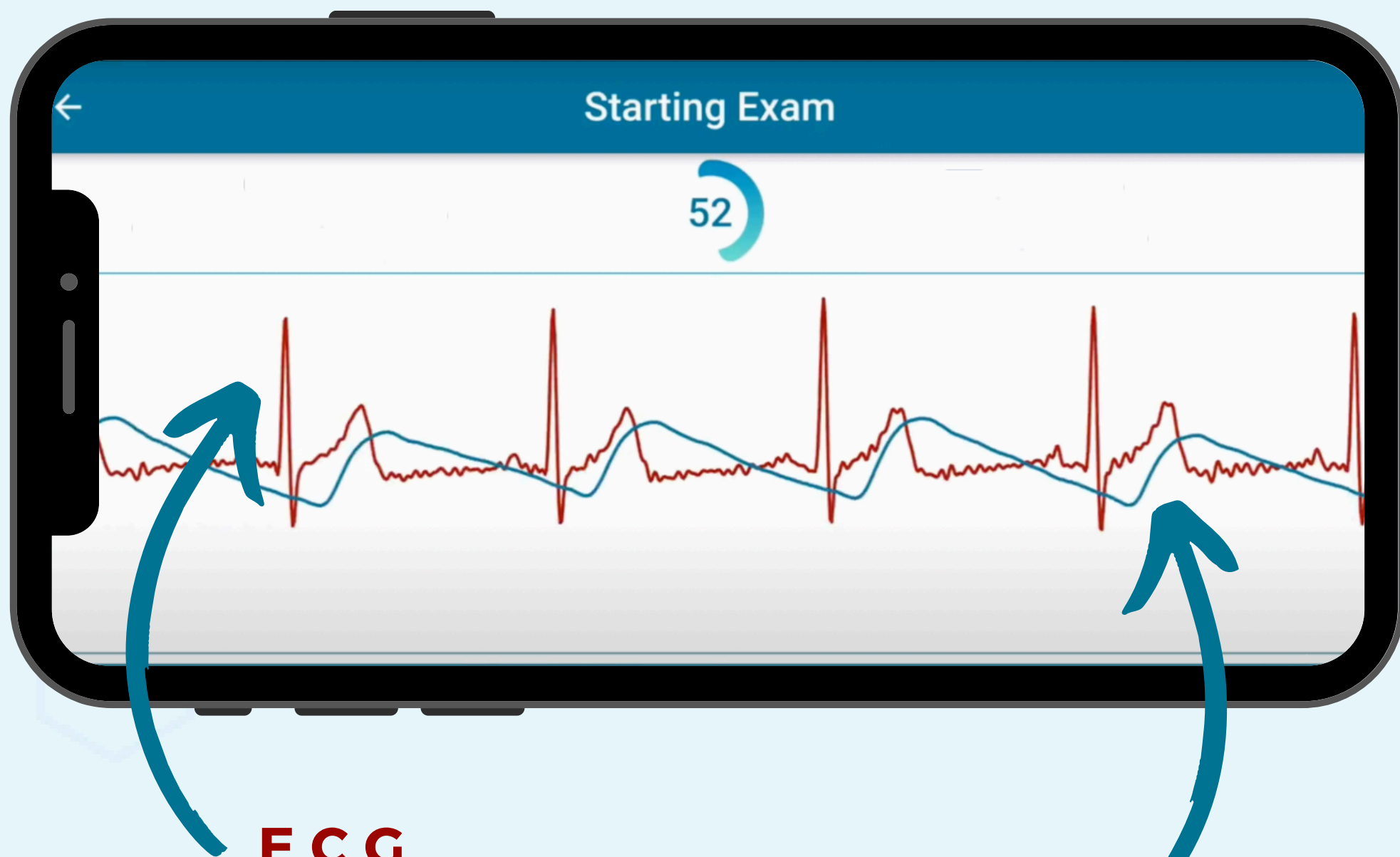


**ECG**

LA LINEA ROSSA MOSTRA IL TUO  
ELETTROCARDIOGRAMMA


**PPG**

LA LINEA BLU MOSTRA IL TUO  
FOTOPLETISMOGRAMMA

**RIMANI FERMO E IN  
POSIZIONE PER OTTENERE  
LA FORMA D'ONDA IN  
FIGURA**

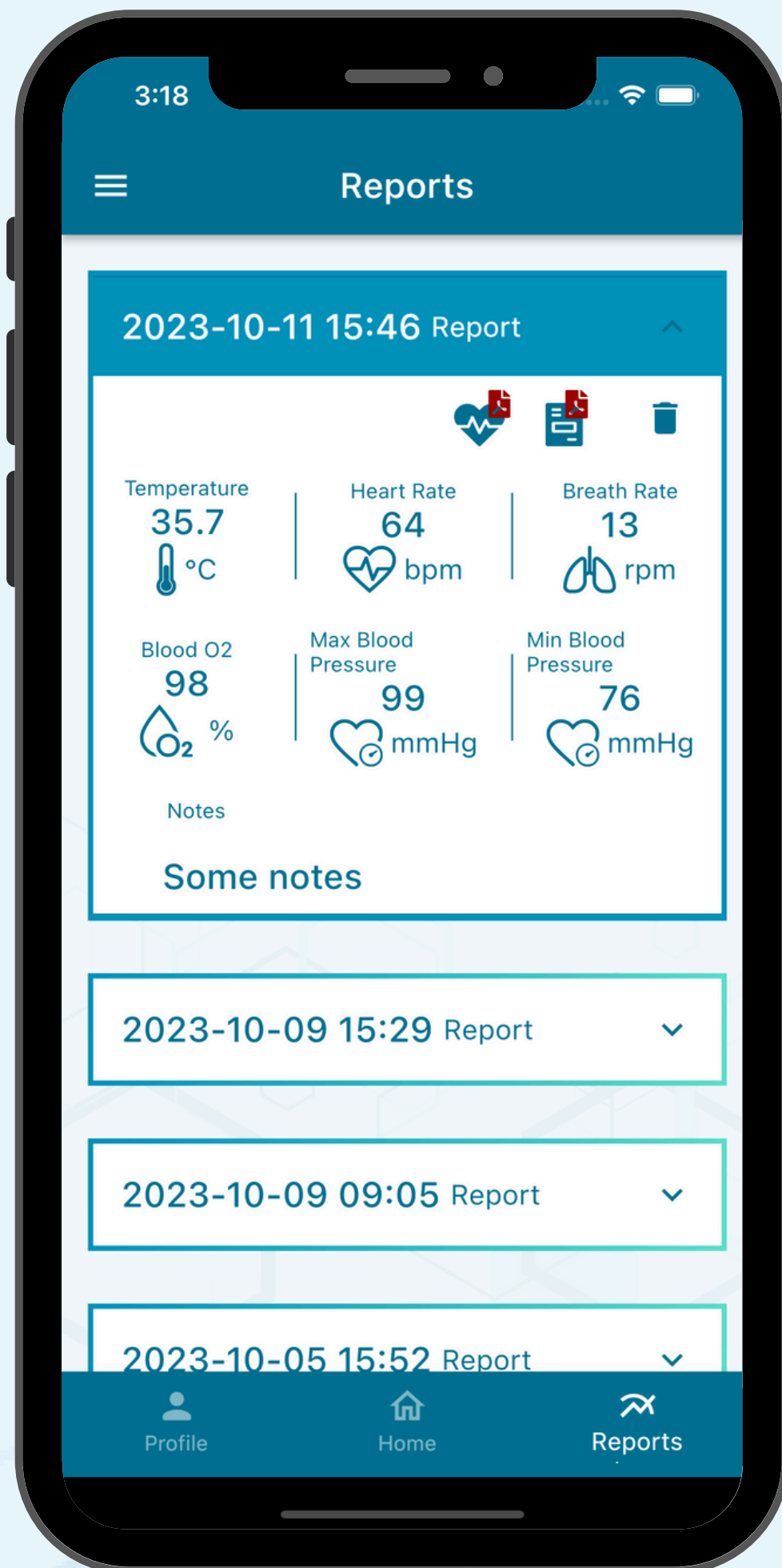


**CONTROLLA I TUOI ESAMI  
NELLA SEZIONE RELATIVA**

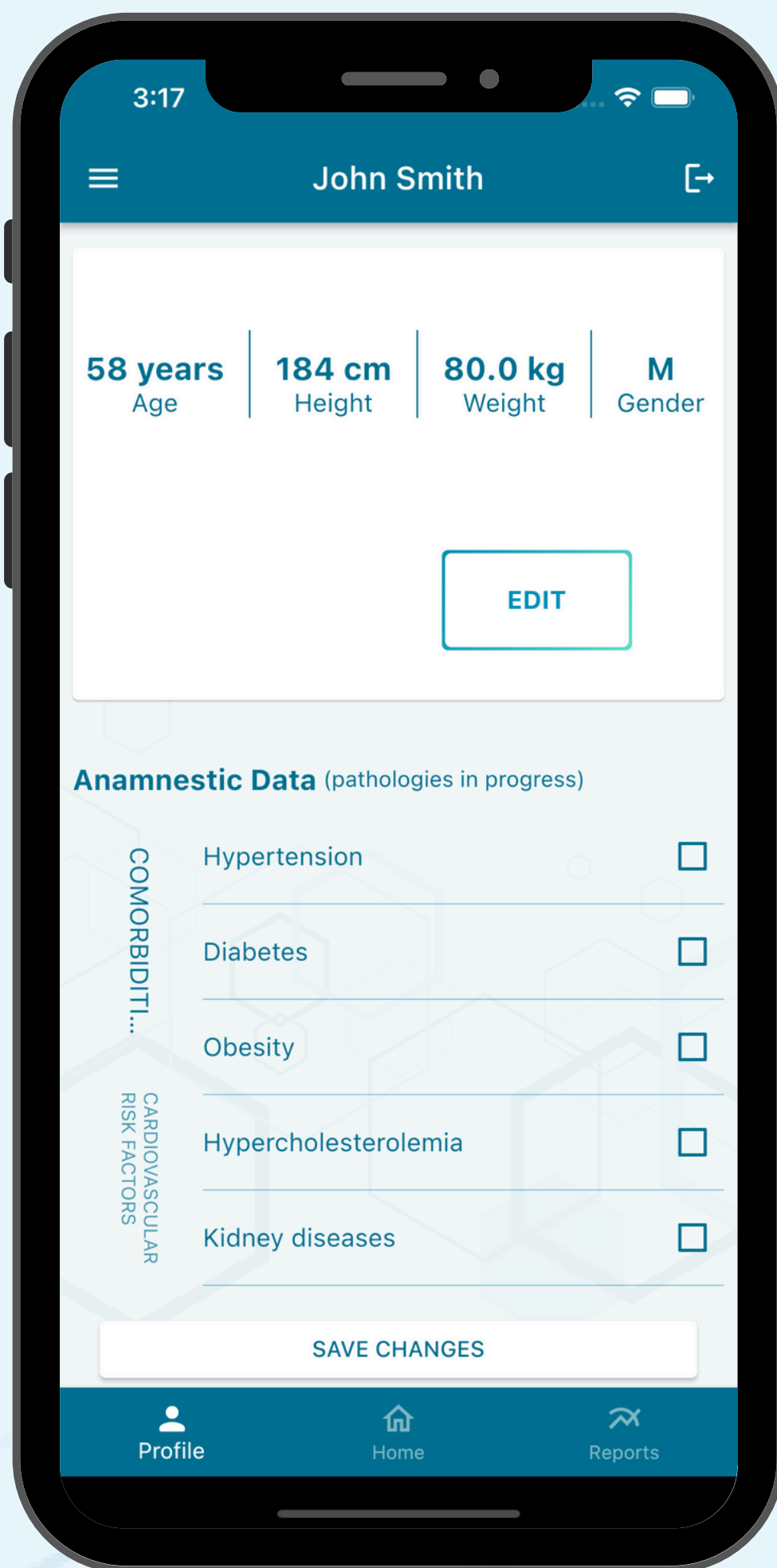

**CONTROLLA E MODIFICA LE  
TUE INFORMAZIONI  
PERSONALI**

# MANAGER

PUOI SCEGLIERE  
L'UTENTE CHE ESEGUIRÀ  
L'ESAME

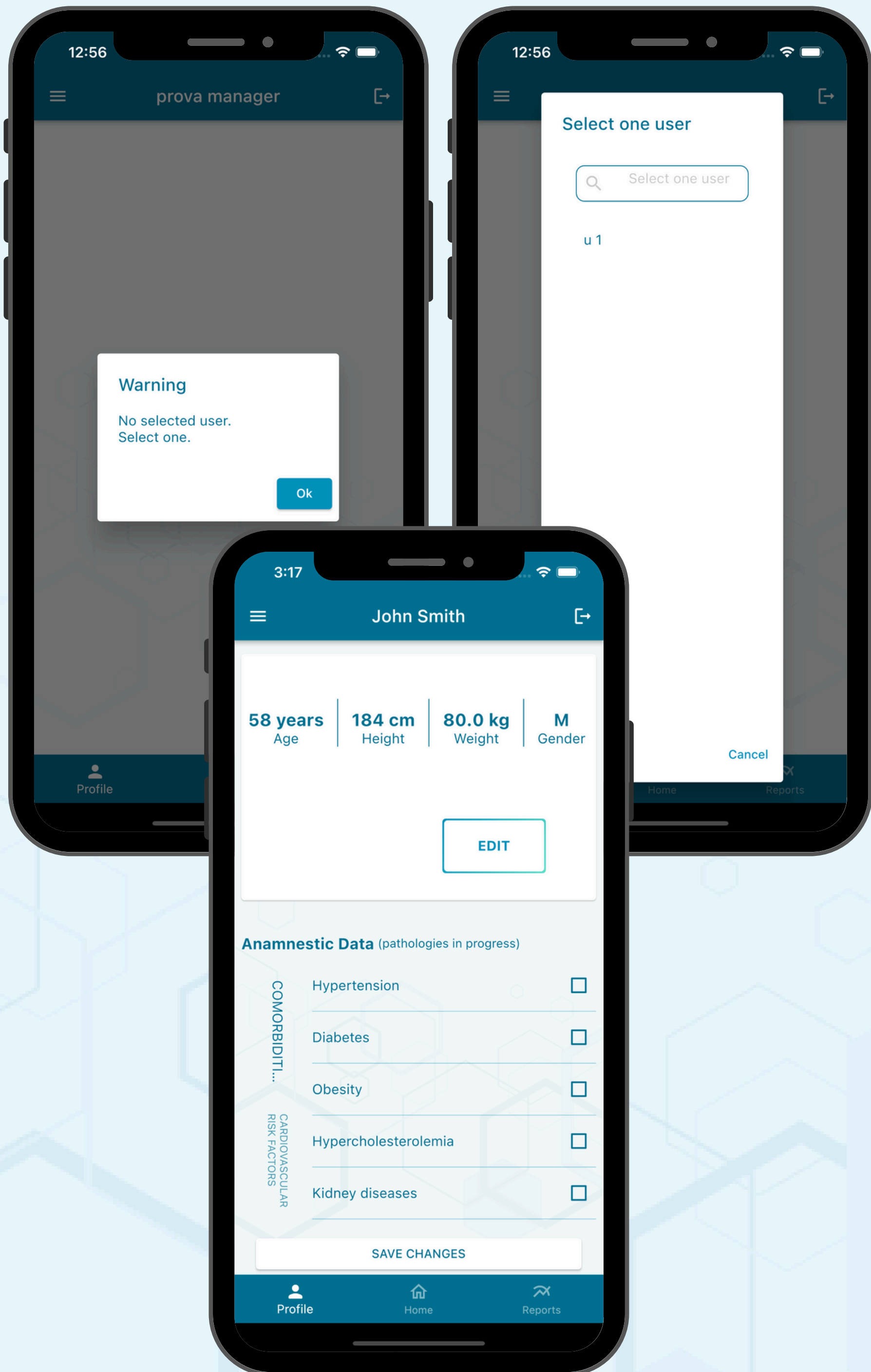

CONTROLLA E MODIFICA  
LE INFORMAZIONI DELL'UTENTE  
SELEZIONATO



## PREMESSE E PRECAUZIONI D'USO

IL SISTEMA IPPOCRATECH CARE È UN DISPOSITIVO MEDICO CLASSIFICATO IN CLASSE I SECONDO REGOLAMENTO MDR 2017/745 UE.

IL SISTEMA NON È DESTINATO A CONSENTIRE UNA DIAGNOSI DIRETTA O UN CONTROLLO DEI PROCESSI FISIOLGICI VITALI OVE LA NATURA DELLE VARIAZIONI È TALE DA POTER CREARE UN PERICOLO IMMEDIATO PER IL PAZIENTE.

IL SISTEMA NON È UTILIZZABILE PER DIAGNOSI E/O MONITORAGGIO DEI PARAMETRI FISIOLGICI VITALI IN REAL TIME E NON È UTILIZZABILE DAL MEDICO PER DIAGNOSTICARE LO STATO DI SALUTE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- FREQUENZA CAMPIONAMENTO DATI: 200HZ SIA PER ECG SIA PER PPG
- TEMPERATURA CAMPIONATA AD INIZIO TEST DALLA FRONTE DEL SOGGETTO
- BATTERIA AL LITIO DA 400 MA/H:
- DURATA DI 5 MESI IN STAND-BY
- DURATA DI 5 ORE IN UTILIZZO CONSECUTIVO ININTERROTTO
- TEMPO DI RICARICA DELLA BATTERIA 4 ORE (INDICATORE DI RICARICA SUL DEVICE)
- CONNETTORE PER LA RICARICA USB-C
- POSSIBILITÀ DI GESTIRE SIA IL SINGOLO UTENTE CHE IL MULTIUTENTE TRAMITE APP PER CELLULARE
- COLLEGAMENTO TRAMITE BT BLE 5.0 (BLUETOOTH) CON CELLULARE O TABLET
- INDICAZIONE DI CARICA DELLA BATTERIA TRAMITE APP
- APP PER IOS E PER ANDROID

## ACCURATEZZA DEI PARAMETRI

ACCURATEZZA MISURA PRESSIONE SISTOLICA  $\pm 4$  MMHG

ACCURATEZZA PRESSIONE DIASTOLICA:  $\pm 4$  MMHG.

ACCURATEZZA TEMPERATURA CORPOREA:  $\pm 0,5$  °C

ACCURATEZZA OSSIGENAZIONE:  $\pm 2$  %

ACCURATEZZA FREQUENZA CARDIACA:  $\pm 3$  BPM

FREQUENZA RESPIRATORIA:  $\pm 4$  RPM